



Comment utiliser l'auto-test Covid-19

Chaque boîte distribuée par la commune de Kristiansand contient cinq kits de test, fabriqués par le laboratoire Roche.

01

Préparatifs

- Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez un désinfectant pour les mains.

02

Préparez le test et testez-vous

- Ouvrez le sachet marqué « 2 », sortez un bouchon et l'un des tubes contenant du liquide. Ouvrez le tube et insérez-le délicatement dans le porte-tubes.
- Ouvrez l'emballage contenant un écouvillon puis retirez celui-ci du sachet sans toucher la boule de coton.
- Penchez légèrement la tête en arrière et insérez l'écouvillon dans chaque narine sur une profondeur d'à peu près deux centimètres, sans forcer.
- Faites tourner l'écouvillon dans chaque narine, 15 secondes en tout. Il est important que l'écouvillon soit bien en contact avec la paroi intérieure du nez, mais ne forcez pas.
- Quand vous avez terminé, placez l'écouvillon dans le tube en plastique et faites tourner dix fois.
- Appuyez ensuite sur les côtés du tube en bas de celui-ci pendant que vous retirez délicatement l'écouvillon. Jetez l'écouvillon.
- Fermez le tube à l'aide du bouchon et disposez le tube dans le support prévu à cet effet.

03

Effectuez la mesure

- Ouvrez l'un des sachets marqués « 1 » et sortez le dispositif de test.
- Déposez quatre gouttes au-dessus de la zone ovale du dispositif de test (pas dans la fenêtre rectangulaire pour la lecture du résultat).
- Attendez 15 à 30 minutes.

04


Lisez les résultats

- S'il y a un trait en face du « C », le résultat est négatif (A)
- S'il y a un trait en face du « C » et un en face du « T », le résultat est positif (B)
- Même si les traits apparaissent faiblement, le résultat est valide. Voir les illustrations ci-dessous.


En cas de test positif - Appelez le centre corona au 94 80 90 41 pour les en informer au plus vite.



Film montrant comment
procéder à l'auto-test

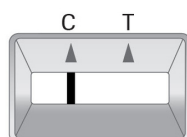

A: Résultat négatif

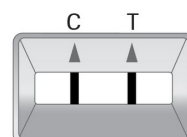

B: Résultat positif

