



PROSEDYRER FOR PROTESER:

- Protesen bør rengjøres med protesebørste og zalo evt mild såpe. Vanlig tannkrem anbefales ikke.
- Tannstein. Legg protesene i eddik og vann. 1 del husholdningseddik 7 % og 1 del vann. La protesene ligge over natten. Rengjør protesene godt med zalo og vann. Gjenta behandlingen ved behov. Bør gjøres rutinemessig en gang i uken ved mye belegg.
- Misfarging. Legg protesene i et glass med 1 del klorin og 4 deler vann i ca. en time (evt 2 ss klorin i ett glass vann natten over). Obs: Proteser med metall skal ikke legges i klorinvann. Protesene skylles og rengjøres godt.
- Løse proteser. Bruk protese festemiddel (krem eller pulver). Dette skal fjernes hver kveld ved å skylle munnen med varmt vann. Tørk evt rester av festemidlet med en fuktig klut eller bruk en vattpinne med litt matolje på for å løsne restene.
- Ved betennelse i ganen: Rens gane og protese med Corsodyl Dentalgel 1 % to ganger daglig. Gjenta behandlingen til infeksjonen er borte. Protesen bør være ute om natta. Grundig rengjøring av protese og gane er viktig for å forebygge betennelse i ganen.